

キムラの四季~向日葵~



2020 第32号

拝啓

新型コロナウイルスの感染にはまだまだ気が抜けない状況で ありますが、皆様いかがお過ごしですか。

感染しないよう3密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの装着、 うがい・手洗いを励行しましょう。







手を洗うモン #WashHands



換気をするモン #OpenWindow

©2010 能木県くまモン

なぜストーマ装具から排泄物が漏れるの?

敬具

装具がストーマの大きさや形に合ってない 原因1

ストーマの大きさや形に変化がないか、面板の開孔サイズは 前回と同じでよいか確認!

ストーマ粘膜は排泄時に蠕動(ぜんどう)運動が起こるため、 大きくなったり小さくなったりします。平常サイズより2~3mm 程度大きい開孔サイズを目安にするとよいでしょう。



装具がストーマ周囲のお腹の状態(皺や窪み)に合ってない 原因2

座った状態で前屈みや腰をひねるなど色々な状態を確認すると、どこに皺や窪み ができるのか、漏れる場所の特定に役立ちます。

寝た状態でしか確認できない場合は、体を横に向けたり足を上げてみたり、また 可動式ベッドの頭側や足側を上げてみて下さい。

皺や窪み部分に保護剤を使用してみるのもよいでしょう。

≪用手成形皮膚保護剤≫

皺や窪みの補正に使用・必要量を手でちぎったり練ったり自由に形成出来ます





製品№.072-98 1箱/3枚入 ¥2.040(税抜)



≪用手成形皮膚保護剤≫

コロプラスト社 ブラバプロテクティブシール




厚み2.5mm 内径18mm 製品番号 No.12035 厚み2.5mm 内径27mm 製品番号 No.12037 厚み2.5mm 内径34mm 製品番号 No.12039 1箱/10枚入 価格 ¥3,000(税抜)

厚み4.2mm 内径18mm 製品番号 No.12045 厚み4.2mm 内径27mm 製品番号 No.12047 製品番号 No.12049 厚み4.2mm 内径34mm 1箱/10枚入 価格 ¥4,500(税抜)

コンバテック コンバッテックシール



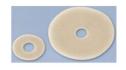

¥4,500(税抜) 48mm 製品No.413503 1箱/10枚入 48mm薄型 製品No.413504 1箱/10枚入 ¥4,000(税抜) 製品No.413505 1箱/10枚入 ¥5,700(税抜)

イーキンジャパン

イーキンシール







Lサイス 製品No.839001 Sサイス^{*} 製品No.839002 スリム 製品№.839005


1箱/20枚入 1箱/10枚入

¥570(税抜) ¥9,000(税抜) ¥4,500(税抜)

ストーマラップ 製品No.839006 1箱/10枚入

¥4,800(税抜)



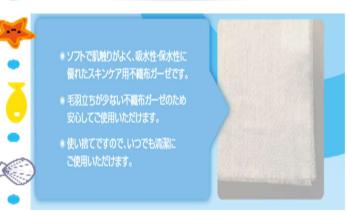





801-065-20 W250×D250mm 材質:スパンレース(レーヨン30%、ポリエステル70%)













夏季休業についてのお知らせ

誠に勝手ながら8月13日~8月16日まで休業させていただきます。 土日・祝日を含め4連休となりますので、宜しくお願い致します。



©2010 熊本県くまモン

ストーマショップ

有限会社 キムラ



TEL:096-334-0700 FAX:096-334-0710

〇営業時間/AM:9:00~PM5:00

〇定 休日/土・日・祝祭日

熊本 ストーマ キムラ

検索

〒860-0834 熊本市南区江越2-1-18

URL: www.u-kimura.jp ホームパージが新しくなりました!