



キムラの四季 ~桜~

2023年 第43号

日増しに暖かくなり、早春の息吹を感じるこの頃です。皆さんお変わりございませんか。桜前線も次第に近づき、行楽シーズンの到来となりました。

今回はお家や外出先でも使用できる『洗淨清拭剤』についてご紹介させていただきます。これからの生活のお役に立てれば幸いです。

洗淨清拭剤の特徴

◎泡立てる必要がない

洗淨清拭剤は水を使わずそのまま使えます
そのため水の用意と泡立ての手間が省ける

◎拭き取るだけで洗える

拭き取るだけで洗淨が完了するため洗い流す手間が省ける

◎皮膚にやさしい成分で構成されている

商品により詳細は異なりますが、弱酸性・保湿成分配合・ノンアルコールと言った皮膚にやさしい成分で構成されている

◎災害時や外出時に効果的

泡立て不要で拭き取るだけで洗淨が出来るという特性上、災害時や外出時などの水が用意できない環境に強い



洗淨清拭剤の使用法

洗淨清拭剤を使用して皮膚を洗淨する場合は、ゴシゴシと擦らず優しく洗いましょう。

また**消化器系ストーマ**(コロストミー・イレオストミー)と**泌尿器系ストーマ**(ウロストミー)では洗淨方法が多少異なります。

消化器系ストーマ



消化器系ストーマ(コロストミー・イレオストミー)の洗淨方法

剥離剤(リムーバー)でストーマ装具を丁寧に剥がしたら、ガーゼやティッシュペーパーで便を拭き取り洗淨剤を使用し皮膚を愛護的に洗淨します。

その際、ストーマ周囲の皮膚に便が付着している可能性があります。

付着している便が周囲の皮膚に広がらないように**外側から内側**にかけて円を描くようにして洗淨していきましょう。

泌尿器系ストーマ



泌尿器系ストーマ(ウロストミー)の洗淨方法

剥離剤(リムーバー)でストーマ装具を丁寧に剥がしたら、ガーゼに洗淨剤をとって愛護的に洗淨します。

泌尿器系ストーマの場合、皮膚に付着している菌によって尿路感染を引き起こさないようにする必要があります。

そのため、菌がストーマ周囲にとどまらないように、**内側から外側**に円を描くようにして洗淨していきましょう。

洗淨直後の皮膚は湿っているため、すぐにストーマ装具を貼付すると剥がれてしまう可能性があります
皮膚がしっかり乾くのを待ってからストーマ装具を貼付するようにしましょう

洗浄清拭剤のご紹介

コロプラスト



シルティー 水のいらないもち泡洗浄剤

天然保湿成分ピュアセシリン配合の泡で出る洗浄剤です。
無香料・無着色で泡立てやすすぎ洗いは不要です。
液ダレしにくい「しっかりもち泡」が特徴です。

容量180ml 商品No.9401 **価格2,178円**(税込)

アルケア



リモイスクレンズ

保湿成分配合のクリームタイプです。
天然オイルが汚れを浮かび上げさせ拭き取るだけで皮膚を清潔にします。
肌をしっとり滑らかに保ち乾燥を防ぎます。

- ①レギュラー 容量 180g 商品No.17701 **価格1,760円**(税込)
- ②プッシュボトル 容量 500g 商品No.17703 **価格4,070円**(税込)
- ③ハンディー 容量 10パック 商品No.17702 **価格825円**(税込)

ベートルプラス



泡ベートルF 清拭・洗浄料

泡で出るタイプで泡立てやすすぎ洗いは不要です。
無香料・無着色・弱酸性で保湿成分セラミドが配合されています。

- ①大容量タイプ 容量 500ml 商品No.BF02 **価格1,540円**(税込)
- ②ボトルタイプ 容量 150ml 商品No.BF01 **価格990円**(税込)

スミス & ネフュー



セキューラCL

洗いたい部分にスプレーをして洗浄します。
弱酸性で保湿成分のあるアロエベラ葉が配合されています。
※この商品は水で洗い流すか濡れタオルで拭きとる必要があります。

- ①ボトルタイプ 容量 118ml 商品No.59430800 **価格1,353円**(税込)
- ②大容量タイプ 容量 236ml 商品No.59430900 **価格1,804円**(税込)

ストーマショップ

有限会社 キムラ

〒860-0834 熊本市南区江越2-1-18


TEL:096-334-0700 FAX:096-334-0710

○営業時間/AM:9:00~PM5:00

○定休日/土・日・祝祭日

熊本 ストーマ キムラ

検索

URL: www.u-kimura.jp  **ホームページが新しくなりました!**